

# GESPODO

Montage des tongs et sandales en kit




# Visualisation des différents éléments



A la réception des tongs, les trous permettant le passage des brides seront déjà réalisés.



L'intercalaire fourni est légèrement plus grand que la base de la tong, cela permettant une marge d'erreur dans le positionnement.

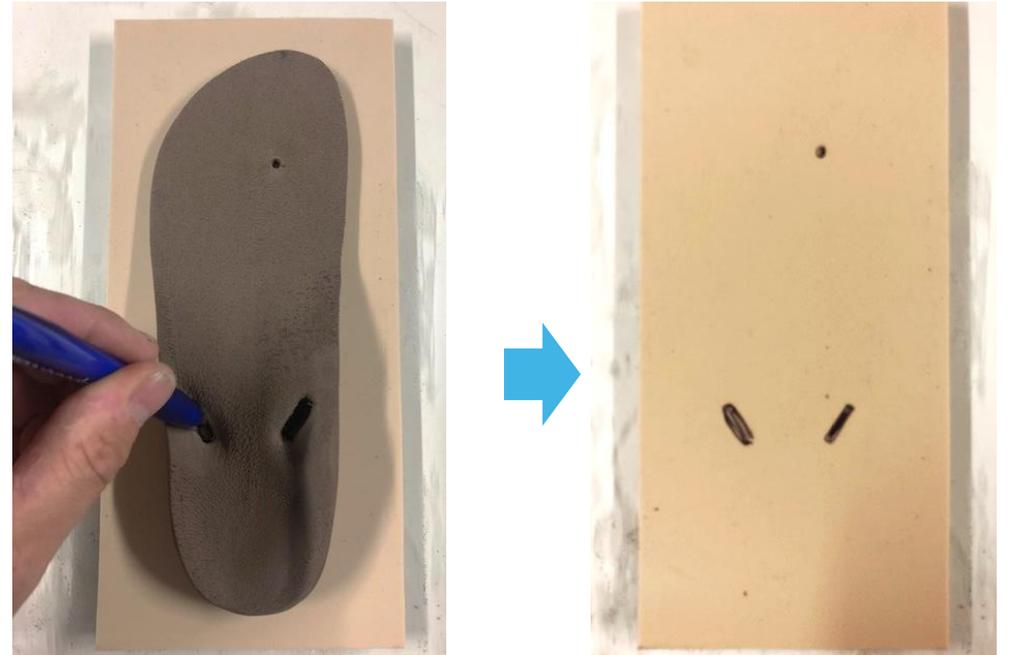

### 1<sup>e</sup> ÉTAPE

- Positionnez la base de la tong sur l'intercalaire
- Tracez sur l'intercalaire le positionnement des trous permettant le passage des brides


## 2e ÉTAPE

Dessinez la zone à découper pour chaque trou



Pour la bride inter-digitale : 5 à 8 mm x 30 mm



Pour les 2 brides situées à l'arrière : 2 rectangles se rejoignant sur leur bord antérieur

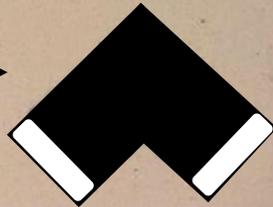

Découpez les 3 zones

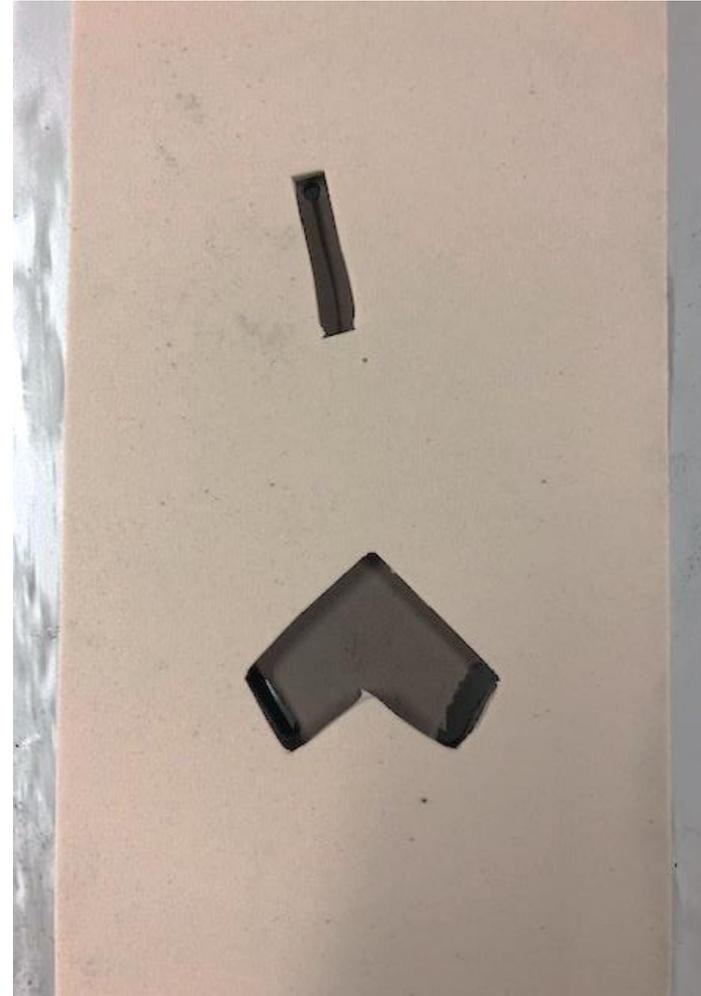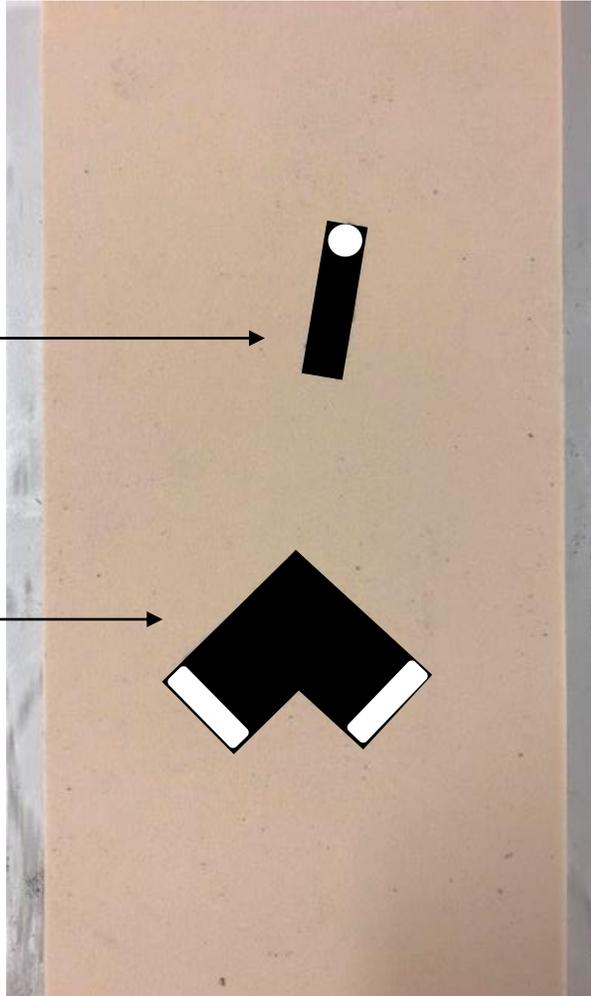

## 3e ÉTAPE

Placez l'intercalaire sur la base de la tong, en faisant attention de respecter le positionnement des trous situés dans la base de la tong

Tracez sur la base de la tong le contour des trous découpés dans l'intercalaire

## 4e ÉTAPE

Insérez la bride inter-digitale et les deux brides postérieures dans leurs trous respectifs

Placez la tong au pied du patient (en charge) et ajustez la longueur des brides en veillant bien au confort et au maintien du pied



Une fois que la longueur des brides est définie, demandez au patient de retirer son pied de la tong et veillez à marquer sur chaque bride la partie inférieure de la base de la tong



Repliez chaque bride sur la zone dessinée sur la base de la tong et découper le surplus de longueur

## 5e ÉTAPE

Retirez les brides de la base de la tong

Encollez la surface inférieure de la base de la tong et la surface supérieure de l'intercalaire. Laissez sécher la colle de contact et coller les deux surfaces entre elles

## 6e ÉTAPE

Insérez les brides en veillant à respecter les bonnes longueurs

Collez les parties débordantes des brides dans les trous prévus à cet effet dans l'intercalaire

## 7e ÉTAPE

Encollez la surface inférieure de l'intercalaire et la surface supérieure de la couche externe (côté lisse). Laissez sécher la colle de contact et coller les deux surfaces entre elles

## 8e ÉTAPE

Terminez la réalisation des tongs en découpant les parties de l'intercalaire et de la couche externe qui débordent du contour de la base de la tong

Poncez les contours avec une roue de finition pour un visuel parfait



**GESPODO**

Strictly Confidential - do not share